



D.E.M.A.

Rodillera regulable de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R066

FINALIDAD

Contener y proteger los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. El diseño con orificio y soporte estabiliza la rótula. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria leve. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por inadecuado talla.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Cierre regulable en abrojo

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

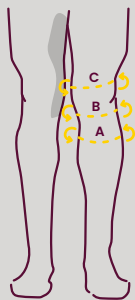

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
Único	30/60 cm	34/64 cm	36/66 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar la prenda en la rodilla.
2. Centrar el orificio en la rótula.
3. Cerrar los abrojos.

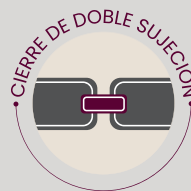

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

