



Rodillera rótula abierta ballenada elástica

CÓDIGO DE PRODUCTO: R067

FINALIDAD

Contener y proteger los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Lesiones ligamentosas, entesopatías, hiperlaxitud articular, tendencia a sub luxación, esguinces leves, traumatismos, sinovitis, artritis y post operatorios. Para uso en actividades cotidianas.

INDICACIONES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria. Sí lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por inadecuado talla.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - Goma 35%.

Cierre regulable en abrojo.

Incluye ballenas laterales de estabilización.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

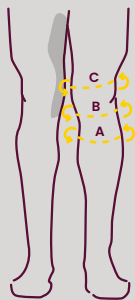

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	28/32 cm	29/36 cm	34/40 cm
2	33/37 cm	33/38 cm	40/44 cm
3	39/43 cm	40/46 cm	44/50 cm
4	43/50 cm	43/50 cm	50/56 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar la prenda en la rodilla.
2. Centrar el orificio en la rótula y las ballenas en cada lateral de la pierna.
3. Cerrar los abrojos

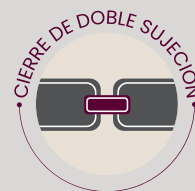

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

