



D.E.M.A.

IN MOTION

Rodillera con varillas flexibles de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R068

FINALIDAD

Contener y limitar parcialmente los movimientos de flexo-extensión y lateralización de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. El diseño con orificio estabiliza la rótula. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que generen inestabilidad articular de la rodilla como hiperlaxitud ligamentaria, esguinces Leves, tendencia a subluxaciones. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por talle inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor. Incluye varillas laterales flexibles de contención.

Doble ajuste en abrojo

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

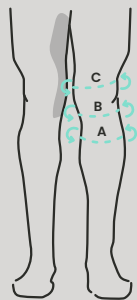

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 28 cm.

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	30/34 cm	30/32 cm	36/40 cm
2	32/36 cm	32/36 cm	40/46 cm
3	36/40 cm	36/40 cm	42/48 cm
4	39/44 cm	40/44 cm	44/50 cm
5	42/46 cm	42/46 cm	48/54 cm


INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro. Deslizar hasta posicionarla en la rodilla.

2. Ubicar el orificio en la rótula y las varillas flexibles en cada lateral de la pierna.

3. Cerrar los abrojos

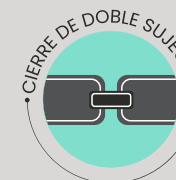

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

