



D.E.M.A.

Rodillera articulada de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R069

FINALIDAD

Limitar los movimientos de hiperextensión de la rodilla. Proteger las estructuras anatómicas que favorecen la estabilidad medio lateral.

USOS GENERALES

Lesiones ligamentosas, entesopatías, hiperlaxitud articular, tendencia a sub luxación, esguinces leves, traumatismos, sinovitis, desgarros, artritis y post operatorios. El diseño con orificio estabiliza la rótula. Brinda calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso en actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran estabilizar los ejes de funcionamiento articular en sentido antero posterior y medio lateral. Tendencia a luxación o subluxación de rodilla. Distensiones ligamentarias. Enteropatías. Tendinopatías. Esguinces. Sinovitis. Artritis. Artrosis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por sobre uso.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor. Incluye dos articulaciones con giro hasta 180°.

Doble ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

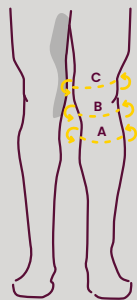

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO


Altura 28 cm.

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	30/34 cm	30/32 cm	36/40 cm
2	32/36 cm	32/36 cm	40/46 cm
3	36/40 cm	36/40 cm	42/48 cm
4	39/44 cm	40/44 cm	44/50 cm
5	42/46 cm	42/46 cm	48/54 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro. Deslizar hasta posicionarla en la rodilla.
2. Ubicar el orificio en la rótula y las varillas articuladas en cada lateral de la pierna.
3. Tomar cada lazo, rodear la pierna, pasar por la argolla y cerrar el abrojo traccionando para mayor seguridad.

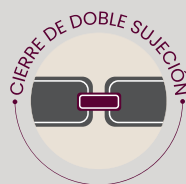

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

