

D.E.M.A.

IN MOTION

Gemelera de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R073

FINALIDAD

Estabilizar y contener la región gemelar.

USOS GENERALES

Recuperación de lesiones musculares, distensiones, desgarros, esguinces. Para uso deportivo y actividades cotidianas. Brinda calor térmico terapéutico, con efecto analgésico.

INDICACIONES

Patologías que requieran limitar y contener la movilidad de la pantorrilla debido a propensión a desarrollar lesiones musculares a ese nivel: distensiones, desgarros, esguinces. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Lesiones dermatológicas en el área a cubrir. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva. Debilidad muscular por uso prolongado.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

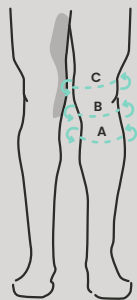

Para conocer tu talla, medí la circunferencia inferior, medio y superior de la pantorrilla

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 24 cm

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	24/30 cm	30/36 cm	34/40 cm
2	30/38 cm	34/40 cm	38/46 cm
3	32/40 cm	36/42 cm	40/48 cm
4	34/42 cm	40/44 cm	44/50 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie y deslizarla hasta posicionarla en la pantorrilla.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

