



# Inmovilizador de pierna

CÓDIGO DE PRODUCTO: R074 CORTO 45CM – R075 LARGO 65CM



## FINALIDAD

Inmovilizar la totalidad de los movimientos de la articulación de la rodilla.

## USOS GENERALES

Esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentosas, patologías meniscales, desgarros, acv, hemiplejías, ecne, paraplejías, lesión medular. Recuperación y rehabilitación de lesiones que requieran inmovilización en la pierna.

## INDICACIONES

Patologías en las que se requiera limitar los movimientos articulares de la rodilla: esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentarias, patologías meniscales y desgarros. Patologías neurológicas en las que se necesite mantener o recuperar la extensión de la rodilla: acv, hemiplejías, ecne, paraplejías, lesión medular. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Limitaciones del rango articular en flexión. Alergia a alguno de los componentes del producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

## PRECAUCIONES

Debilidad de la musculatura de los miembros inferiores por uso prolongado.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 65% - Poliéster 35%.

Incluye 3 varillas de inmovilización.

Ajuste en abrojo. Interior acolchado.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

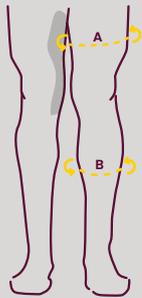

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del muslo y la pantorrilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	MUSLO (A)	PANTORILLA (B)
1	44/54 cm	28/38 cm
2	52/64 cm	38/48 cm
3	62/72 cm	46/56 cm
4	72/82 cm	56/66 cm

## INSTRUCCIONES DE USO




**1.** Ubicar la prenda en la pierna.



**2.** Posicionar las varillas: una en la parte posterior y una a cada lado. Malear según la necesidad de uso. Cerrar y ajustar los abrojos.



**3.** Verificar que el orificio esté centrado en la rótula.

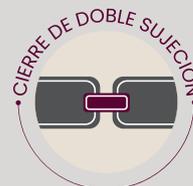

**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

