



D.E.M.A.

Inmovilizador de pierna de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: R076

FINALIDAD

Inmovilizar la totalidad de los movimientos de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentosas, patologías meniscales, desgarros, acv, hemiplejias, ecne, paraplejias, lesión medular. Brinda calor terapéutico, antiinflamatorio y analgésico. Recuperación y rehabilitación de lesiones que requieran inmovilización en la pierna.

INDICACIONES

Patologías en las que se requiera limitar los movimientos articulares de la rodilla, como esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentarias, patologías meniscales y desgarros. Patologías neurológicas en las que se necesite mantener o recuperar la extensión de la rodilla: acv, hemiplejias, ecne, paraplejias, mielomeningocele, y lesión medular. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Limitaciones del rango articular en flexión. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Debilidad de la musculatura de los miembros inferiores por uso prolongado y excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye 3 varillas de inmovilización.

Ajuste en 6 abrojos.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

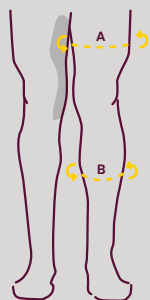

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del muslo y la pantorrilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 65 cm

TALLE	MUSLO (A)	PANTORRILLA (B)
1	44/57 cm	28/41 cm
2	52/67 cm	38/51 cm
3	62/76 cm	46/60 cm
4	72/86 cm	56/70 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la prenda en la pierna.
2. Posicionar las varillas: una en la parte posterior y una a cada lateral. Malear según la necesidad de uso.
3. Cerrar los 6 abrojos.
4. Verificar que el orificio este centrado en la rótula.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

