



D.E.M.A.

Rodillera con suplemento rotuliano de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: R079 – R080

FINALIDAD

Contener, proteger y limitar parcialmente la movilidad de la rótula, del tendón rotuliano y los movimientos de flexión, extensión y lateralización de la articulación de la rodilla.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. El diseño con orificio y soporte estabiliza la rótula. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico. Para uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria. Subluxación o luxación rotuliana por alteraciones anatómicas o desbalances musculares. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talle inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye un suplemento interno de contención.

R080 doble sujeción en abrojo
R079 sin sujeción.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

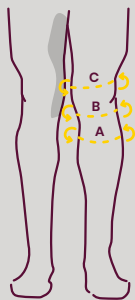

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO


Altura 28 cm

	(A)	(B)	(C)
TALLE	INFERIOR	MEDIO	MUSLO
1	30/36 cm	30/36 cm	35/40 cm
2	36/40 cm	36/40 cm	40/46 cm
3	40/44 cm	40/44 cm	42/48 cm
4	44/52 cm	44/48 cm	48/52 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro.
2. Deslizar hasta la rodilla.
3. Ubicar el soporte en U debajo de la rótula o según la necesidad de uso.
4. Ajustar los abrojos si el modelo incluye doble sujeción.

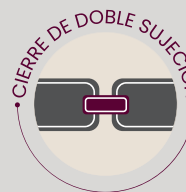

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

