



D.E.M.A.

Rodillera articulada

CODIGO DE PRODUCTO: R090

FINALIDAD

Limitar los movimientos de hiperextensión de la rodilla. Proteger las estructuras anatómicas que favorecen la estabilidad medio lateral.

USOS GENERALES

Recuperación de lesiones ligamentosas, entesopatías, hiperlaxitud articular, tendencia a sub luxación, esguinces leves, traumatismos, sinovitis, artritis y post operatorios. Para uso en actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran estabilizar los ejes de funcionamiento articular en sentido antero posterior y medio lateral. Tendencia a luxación o subluxación de rodilla. Distensiones ligamentarias. Enteropatías. Tendinopatías. Esguinces. Sinovitis. Artritis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por sobre uso.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% goma 35%.

Incluye dos articulaciones con giro hasta 180°.

Doble cierre en abrojo

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

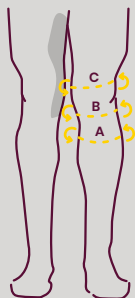

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 28 cm

	(A)	(B)	(C)
TALLE	INFERIOR	MEDIO	SUPERIOR
1	30/36 cm	30/38 cm	35/40 cm
2	36/40 cm	36/40 cm	40/46 cm
3	40/44 cm	40/44 cm	44/50 cm
4	44/52cm	44/52 cm	50/58 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Posicionar la prenda en la rodilla.



2. Centrar el orificio en la rótula y las varillas en cada lateral de la pierna.



3. Cerrar los abrojos.

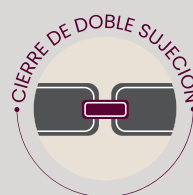

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contamos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

