



Rodillera policéntrica de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: R092

FINALIDAD

Limitar los movimientos de la articulación de la rodilla e inmovilizar la región en forma gradual con posibilidad de posicionar el rango articular. Centro de rotación anatómico.

USOS GENERALES

Recuperación de esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentosas, patologías meniscales, desgarros. Brinda efecto térmico analgésico. Para uso en actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías en las que se requiera limitar gradualmente los movimientos articulares de la rodilla: esguinces, traumatismos, post quirúrgicos, distensiones ligamentarias, patologías meniscales y desgarros, teniendo la posibilidad de adquirir en forma progresiva el rango articular. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Debilidad de la musculatura de los miembros inferiores por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye una articulación policéntrica que limita los movimientos en flexión y extensión con topes cada 10°.

Doble ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior a la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE


RODILLA

1	hasta 39 cm
2	hasta 40 cm
3	hasta 43 cm
4	hasta 46 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Las articulaciones poseen topes que deben ubicarse según indicación médica.
2. Abrir los lazos de abrojo.
3. Introducir la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro. Deslizar hasta posicionarla en la rodilla.
4. Posicionar el orificio en la rótula y sus varillas articuladas en cada lateral de la pierna.
5. Cerrar el abrojo.

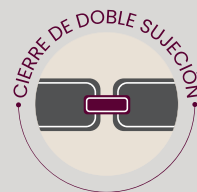


D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

