



D.E.M.A.

Rodillera estabilizadora de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: R093

FINALIDAD

Limita y contiene los ejes de movimiento anteroposterior y lateral de la articulación de la rodilla, brindando ajuste progresivo a las estructuras anatómicas ligamentarias que favorecen la estabilidad de la rodilla.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, inestabilidad articular, esguinces leves, subluxaciones. Contención a los músculos, articulaciones y ligamentos de la rodilla. Recuperación de post operatorios, post artroscopia, fracturas, bursitis, tendinitis, lesiones, artrosis, esguinces, distensiones y desgarros. Brindar calor térmico terapéutico, con efecto analgésico antiinflamatorio. Para uso deportivo y actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatólogicas como distensiones ligamentarias de los cruzados, rupturas parciales, inestabilidad e hiperlaxitud ligamentaria (especialmente de los ligamentos cruzados). Si lo desea, consulte a su médico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado. Hipotrofia muscular por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye varillas laterales flexibles de contención.

Cierre en cruz de asistencia en abrojo

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.




ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



MEDIDAS

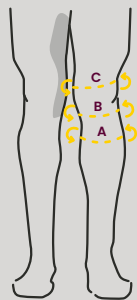

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la parte superior, media e inferior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 28 cm.

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	28/34 cm	30/32 cm	35/40 cm
2	32/36 cm	32/34 cm	40/45 cm
3	34/38 cm	36/40 cm	42/48 cm
4	38/44 cm	40/42 cm	46/50 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie. Evitar estirar el centro. Deslizar hasta posicionarla en la rodilla.




2. Tomar cada lazo y cruzar en cruz debajo de la rodilla. Pasar las tiras por las argollas centrales.



3. Volver a cruzar las sujeciones sobre la rodilla y pasar por las argollas superiores.



4. Cerrar el abrojo.

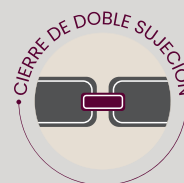

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

