



**D.E.M.A.**

**IN MOTION**

## Rodillera acolchada de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: RA

### FINALIDAD

Contener los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la rodilla. Proteger las estructuras anatómicas y el área rotuliana ante posibles traumatismos.

### USOS GENERALES

Deportiva. Ideal para la protección, recuperación o rehabilitación de esguinces, lesiones, distensiones y artrosis. Brinda calor térmico terapéutico.

### INDICACIONES

Inestabilidades leves de la articulación de la rodilla e hiperlaxitud ligamentaria. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla. Alergia a alguno de los componentes del producto.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por inadecuado talla.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros.

Centro acolchado de calor terapéutico.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

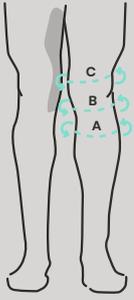

Para conocer tu talla, medí la circunferencia superior, medio e inferior de la rodilla.

**UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO**

Altura 28 cm

TALLE	(A) INFERIOR	(B) MEDIO	(C) SUPERIOR
1	30/36 cm	hasta 36 cm	38/44 cm
2	34/38 cm	hasta 38 cm	40/46 cm
3	36/40 cm	hasta 40 cm	42/48 cm
4	38/44 cm	hasta 44 cm	46/54 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie.
2. Ubicar el sector acolchado en la rótula.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
**IN MOTION**



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

**anmat**  
Asociación Nacional de Maquinaría,  
Alimentos y Tecnología Médica

