



**D.E.M.A.**

**IN MOTION**

## Rodillera elástica

CÓDIGO DE PRODUCTO: ROEL

### FINALIDAD

Contener y proteger los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la rodilla.

### USOS GENERALES

Brinda contención a los músculos y ligamentos. Para uso deportivo o actividades cotidianas.

### INDICACIONES

Inestabilidades e hiperlaxitud leves de la articulación de la rodilla. Si lo desea, consulte a su médico.

### CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran mayor nivel de contención e inmovilización de la articulación de la rodilla.  
Alergia a alguno de los componentes del producto.

### PRECAUCIONES

Ajuste excesivo por talle inadecuado.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% goma 35%.  
Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia superior de la rodilla.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

| TALLE | RODILLA           |
|-------|-------------------|
| 1     | 16 cm hasta 20 cm |
| 2     | 18 cm hasta 23 cm |
| 3     | 20 cm hasta 26 cm |
| 4     | 22 cm hasta 30 cm |

INSTRUCCIONES DE USO



- 1. Introducir la prenda desde el pie.
- 2. Ubicarla en la rodilla.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618