



## Soporte postural de clavícula

CÓDIGO DE PRODUCTO: S027

### FINALIDAD

Contener y estabilizar las clavículas, mejorar y corregir la postura en cifosis dorsal, alinear y aproximar las estructuras anatómicas de la cintura escapular.

### USOS GENERALES

Sostén y corrector postural en actividades cotidianas. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en periodos fraccionados. Si lo desea, consulte a su médico.

### INDICACIONES

Fracturas y fisuras claviculares, luxaciones y subluxaciones de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, deformidades posturales como la cifosis dorsal o la antepulsión excesiva de hombros.

### CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica.

### GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



### PRECAUCIONES

Malestares por uso excesivo. Irritación de la piel en la zona axilar por roce o uso inadecuado.

### CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



### CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 100% e interior acolchado.

Contiene 1 unidad.



### CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



### ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

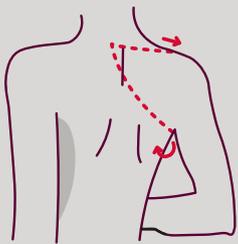

Para conocer tu talla, desde la postura erguida, medí la circunferencia partiendo desde el centro de la espalda (desde la cervical, 5 cm por debajo aprox), pasando por el hombro hacia adelante, luego pasar por debajo de la axila y volver al centro nuevamente.

UNISEX

TALLE	CLAVÍCULA	PESO
1	34/55 cm	hasta 40 kg
2	38/65 cm	hasta 70 kg
3	44/75 cm	hasta 80 kg
4	48/85 cm	hasta 90 kg


## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Posicionar la prenda debajo de la zona cervical.



**2.** Tomar los tiradores desde el extremo superior y llevarlos al frente sobre los hombros.

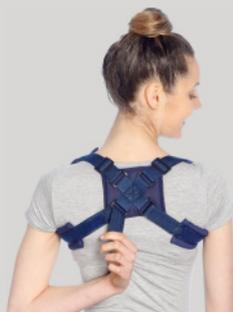

**3.** Pasar las tiras por debajo de las axilas.



**4.** Deslizar cada una dentro de la argolla plástica correspondiente.



**5.** Ajustar y cerrar sobre el mismo tirador con el abrojo.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

**D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat  
Asociación Nacional de Medicamentos,  
Alimentos y Tecnología Médica

