



D.E.M.A.

IN MOTION

Soporte postural de clavícula en neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: S028

FINALIDAD

Contener y estabilizar las clavículas, mejorar y corregir la postura en cifosis dorsal, alinear y aproximar las estructuras anatómicas de la cintura escapular.

USOS GENERALES

Sostén corrector postural en actividades habituales. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en periodos fraccionados.

INDICACIONES

Fracturas, fisuras claviculares, luxaciones, subluxaciones de las articulaciones, esternoclavicular y acromioclavicular, deformidades posturales como la cifosis dorsal o la antepulsión excesiva de hombros. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Malestares por uso excesivo. Irritación de la piel en la zona axilar por roce.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Incluye 2 bandas acolchadas movibles.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

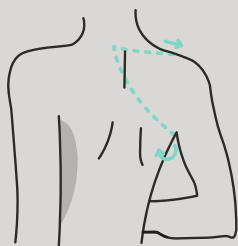

Para conocer tu talle, medí la circunferencia desde el centro de la espalda, pasando por encima del hombro hacia adelante, luego debajo de la axila y volver al centro

UNISEX

TALLE

CLAVÍCULA

PESO

0

43 / 55 cm

hasta 40 kg

1

55 / 60 cm

hasta 70 kg

2

60 / 75 cm

hasta 80 kg

3

70 / 85 cm

hasta 90 kg

4

85 / 95 cm

hasta 100 kg

INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar la prenda debajo de la zona cervical.



2. Tomar los tiradores desde el extremo superior y llevarlos al frente sobre los hombros.



3. Pasar por debajo de las axilas y deslizar cada uno dentro de la argolla correspondiente.



4. Ajustar y cerrar sobre el mismo tirador con el abrojo.



5. El producto está provisto con dos almohadillas internas móviles para ubicar según su comodidad.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

**Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:**

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

