



Soporte antideslizante sobre rodilla

CODIGO DE PRODUCTO: SC

FINALIDAD

Sujetar, posturar y contener el equipamiento protésico en el paciente amputado transtibial.

USOS GENERALES

Sostén de prótesis sobre rodilla. Alivio de tensiones y malestares. Brinda comodidad y soporte.

INDICACIONES

Pacientes que han padecido amputación transtibial de diversas causas y en los que es necesaria una sujeción segura y cómoda de su prótesis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Reacciones dermatológicas por maceración de la piel.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor y goma antideslizante.

Ajuste en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

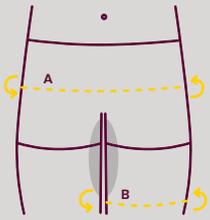

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de cadera y circunferencia del muñón o prótesis.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	(A) CADERA	(B) PRÓTESIS	ALTURA
CH	84/104 cm	38/46 cm	hasta 1,65 m
M	100/120 cm	50/60 cm	hasta 1,70 m
G	110/138 cm	60/70 cm	hasta 1,80 m
EG	116/146 cm	66/82 cm	hasta 1,95 m

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir los abrojos.
2. Colocar la prenda hasta posicionarla sobre el muñón.
3. Ubicar el sector de goma sobre la prótesis.
4. Ajustar el lazo de abrojo inferior.
5. Cerrar el extremo superior rodeando la cadera.
6. Sujetar los abrojos.

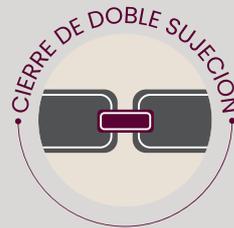

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

