



D.E.M.A.

IN MOTION

Tobillera de contención simple

CÓDIGO DE PRODUCTO: T045

FINALIDAD

Estabilizar y contener las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación del tobillo.

USOS GENERALES

Tendinitis, distensiones ligamentosas, artritis, sinovitis. Sostén y estabilidad a la articulación del tobillo. Indicada para prevención y recuperación de lesiones. Para uso deportivo o actividades habituales.

INDICACIONES

Situaciones en las que se requiera contener los movimientos articulares del tobillo. Patologías inflamatorias agudas y crónicas como tendinitis, distensiones ligamentarias, artritis, sinovitis de tobillo leves. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor grado de contención y estabilización. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talle inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - Goma 35%.

Cierre en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia del empeine y del tobillo. Su suma es igual al talla que corresponde

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	SUMA DEL EMPEINE Y EL TOBILLO
1	44 cm hasta 60 cm
2	50 cm hasta 62 cm
3	58 cm hasta 64 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la prenda en la planta del pie.



2. Sujetar los dos extremos y realizar una cruz rodeando el tobillo.



3. Ajustar el abrojo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
IN MOTION



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Maquillistas,
Alimentos y Tecnología Médica

