



Tobillera tubo de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: T047

FINALIDAD

Estabilizar y contener las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación del tobillo.

USOS GENERALES

Hiperlaxitud ligamentaria, traumatismos, esguinces, artritis, distensiones, torceduras, tendinitis, distensiones, bursitis, desgarros, inflamaciones, esguinces, recuperación de lesiones y post operatorios. Contención a los movimientos del tobillo, asiste a los ligamentos y las articulaciones. El material en neoprene ofrece calor terapéutico con efecto analgésico. Para uso deportivo y actividades habituales.

INDICACIONES

Situaciones en las que se requiera contener los movimientos articulares del tobillo. Patologías inflamatorias agudas o crónicas como tendinitis, distensiones ligamentarias, artritis y sinovitis de tobillo leves. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor grado de contención y estabilización. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

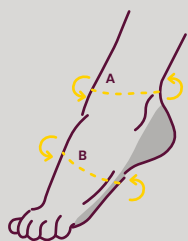

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del tobillo y empeine.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	TOBILLO (A)	EMPEINE (B)
1	20/26 cm	18/24 cm
2	24/30 cm	20/26 cm
3	26/32 cm	22/28 cm
4	26/34 cm	24/30 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie y posicionarla en el tobillo.
2. Centrar el orificio en el talón.

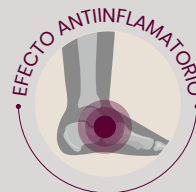

D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

