



D.E.M.A.

IN MOTION

Tobillera en ocho de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: T050

FINALIDAD

Estabilizar y contener las estructuras anatómicas que forman parte de la articulación del tobillo.

USOS GENERALES

Tendinitis, distensiones ligamentosas, artritis, sinovitis. Sostén y estabilidad a la articulación del tobillo. Indicada para prevención y recuperación de lesiones. Para uso deportivo o actividades habituales. El neoprene brinda calor térmico terapéutico, con efecto analgésico.

INDICACIONES

Situaciones en las que se requiera contener los movimientos articulares del tobillo. Patologías inflamatorias agudas y crónicas como tendinitis, distensiones ligamentarias, artritis, sinovitis de tobillo leves. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica o que precisen mayor grado de contención y estabilización. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros.

Cierre en abrojo.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

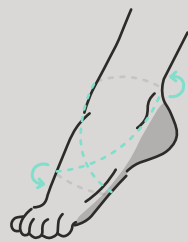

Para conocer tu talla, medí en forma de 8 desde el empeine hasta el tobillo. Su suma es igual al talla que corresponde.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	SUMA DEL EMPEINE Y EL TOBILLO
1	35 cm hasta 46 cm
2	42 cm hasta 52 cm
3	45 cm hasta 55 cm
4	48 cm hasta 58 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la prenda en la planta del pie.



2. Sujetar los dos extremos y realizar una cruz rodeando el tobillo.



3. Ajustar el abrojo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618