



Tobillera de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: T054 CON CONTENCIÓN LATERAL
T048 SIN CONTENCIÓN LATERAL



FINALIDAD

Contener y limitar parcialmente la articulación del tobillo en sentido medio lateral.

USOS GENERALES

Tendinitis, distensiones ligamentosas, sinovitis, artritis, traumatismos, contusiones, esguinces y post operatorios. Brinda a la articulación estabilidad y contención ligamentaria. El material en neoprene brinda calor terapéutico y antiinflamatorio. Para uso deportivo y en actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y reumatológicas que presenten inestabilidad de la articulación del tobillo, hiperlaxitud articular, debilidad muscular. Esguinces, entorsis, tendinitis, traumatismos, contusiones, artritis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Síndromes de estabilidad articular severos que requieran otro tipo de tratamiento. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado y excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.

Ajuste en abrojo.

Código T054: Incluye varillas de contención flexibles laterales.

Código T048: Sin inclusión de varillas.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

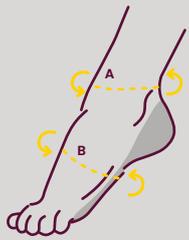

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del tobillo y empeine.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	TOBILLO (A)	EMPEINE (B)
1	18/20 cm	20/26 cm
2	22/24 cm	22/28 cm
3	24/28 cm	24/30 cm
4	26/30 cm	26/32 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir la prenda desde el pie.

2. Ubicarla en el tobillo.

3. Centrar el orificio en el talón.



4. Ajustar el abrojo.

5. Posicionar las varillas en los laterales.

6. Cerrar el abrojo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Maestrías
Aparatos y Tecnología Médica

