



D.E.M.A.

Inmovilizador de tobillo con cordón de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: T055

FINALIDAD

Contener y limitar parcialmente la articulación del tobillo en sentido medio lateral.

USOS GENERALES

Tendinitis, distensiones ligamentosas, sinovitis, artritis, traumatismos, contusiones, torceduras, inflamaciones, esguinces. Evita movimientos indeseados. Brinda a la articulación estabilidad y contención ligamentaria. El material en neoprene ofrece calor terapéutico y antiinflamatorio. Para uso en actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas y reumatológicas que presenten inestabilidad de la articulación del tobillo, hiperlaxitud articular, debilidad muscular. Esguinces, entorsis, tendinitis, traumatismos, contusiones, artritis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Síndromes de estabilidad articular severos que requieran otro tipo de tratamiento. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado y excesivo.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor.

Incluye varillas rígidas laterales maleables según la necesidad de uso.

Cierre acordonado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

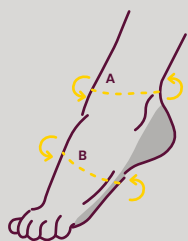

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del tobillo y empeine.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	TOBILLO (A)	EMPEINE (B)
1	20/24 cm	16/20 cm
2	22/26 cm	18/22 cm
3	24/28 cm	20/26 cm
4	26/32 cm	22/30 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Desajustar los cordones. Introducir la prenda desde el pie.



2. Posicionarla en el tobillo. Ubicar la solapa en el empeine.



3. Centrar las ballenas en cada lado del pie. Ajustar los cordones.

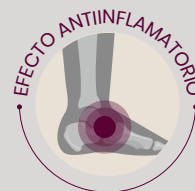

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

