



# Bota walker

CODIGO DE PRODUCTO: WALKV

## FINALIDAD

Inmovilizar totalmente la articulación del tobillo.

## USOS GENERALES

Esguinces severos, fracturas, roturas ligamentosas y tendinosas, post quirúrgicos, lesiones del ciático poplíteo externo. Inmoviliza la región afectada. Alternativa para el yeso.

## INDICACIONES

Patologías que requieran inmovilización total de la articulación del tobillo por lesión de las estructuras anatómicas. Esguinces severos, fracturas, roturas ligamentarias y tendinosas, post quirúrgicos. Patologías de nervio periférico que favorezcan la caída del antepié como la lesión del nervio ciático poplíteo externo. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Procesos fracturarios que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado y excesivo, lesiones de piel por fricción.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Plástico de 5 ½ mm.

Incluye una funda interna acolchada, suela reforzada antideslizante y cierre en cinco abrojos de sujeción.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS



Para conocer tu talla, debes conocer tu número de calzado.

**UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO**

Altura 40 cm

TALLE	SUELA	Nº CALZADO
1	20 cm	34/35
2	23 cm	36/37
3	24 cm	38/39
4	25 cm	40/42
5	28 cm	43/44
6	29 cm	45/46

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Posicionar la funda interior en el pie.



**2.** Cerrar los abrojos.



**3.** Ubicar el talón y verificar que calce correctamente.



**4.** Ajustar las tiras con los abrojos.



**5.** Al andar apoyar el talón y girar el pie a 45°.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

