



D.E.M.A.

Zapato post quirúrgico

CODIGO DE PRODUCTO: ZQ

FINALIDAD

Proteger y posturar las estructuras anatómicas del pie posibilitando apoyo distal post quirúrgico.

USOS GENERALES

Post quirúrgicos del pie y antepié. Brinda mayor comodidad y seguridad en periodos de recuperación.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas que requieran resolución quirúrgica y luego requieran apoyo distal. Post quirúrgicos de fracturas, alineaciones articulares (cirugía de hallux valgus o juanete). Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Post quirúrgicos en los que se deba evitar el apoyo distal. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Lesiones por talle inadecuado.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Macramé.

Suela de goma y varilla interna.

Contrafuerte reforzado.

Cierre en abrojo delantero

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia del antepié, el largo de suela y número de calzado.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	ANTEPIE	LARGO SUELA	Nº CALZADO
0	30 cm	24 cm	34/35
1	31 cm	26 cm	36/37
2	32 cm	27 cm	38/39
3	33 cm	28 cm	40/42
4	38 cm	31 cm	43/45

INSTRUCCIONES DE USO




1. Abrir el producto.



2. Posicionar el pie y corroborar que el talón calce correctamente.



3. Ajustar sus abrojos.

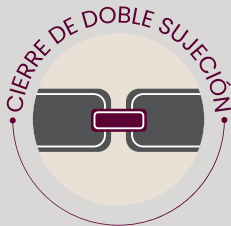

D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618