



Zapato para yeso

CODIGO DE PRODUCTO: ZY

FINALIDAD

Posibilitar apoyo distal en patologías tratadas con yeso.

USOS GENERALES

Brinda mayor comodidad y seguridad en periodos de recuperación con yeso.

INDICACIONES

Pacientes con yeso de miembro inferior que requieran realizar apoyo distal o desplazamiento. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con yeso en los que se deba evitar el apoyo distal. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por sobre uso.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Macramé.

Cierre en abrojo posterior y ajuste delantero.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, debes conocer tu número de calzado.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	SUELA	Nº CALZADO
1	25,5 cm	34/35/36/37
2	27 cm	28/39/40/41
3	31 cm	42/43/44

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir el producto.
2. Posicionar el pie y corroborar que el talón calce correctamente.
3. Ajustar sus abrojos.

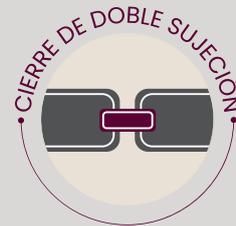

D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618